

Geräteabdeckungen

PRODUKTKATALOG



PROMECON

Inhaltsverzeichnis

Sterile Geräteabdeckungen zum Einmalgebrauch

Sterile Ultraschallabdeckungen

SonoGuard Plus & SonoGuard 3-4

Steriles Ultraschallgel 4

SonoGuard Sets 5

Sterile Kamerabezüge

OptiGuard QuickChange Pro & ArthrO 6-7

OptiGuard Access 8

Bestellinformationen 9

SonoGuard

Sterile Ultraschallabdeckungen

SonoGuard Plus Ultraschallabdeckung

Mit **ClearView**-Haftschallleitfläche

- **ClearView**-Haftschallleitfläche ermöglicht eine optimale Schallkopplung
- in der Abdeckung wird kein Gel benötigt
- hinterlässt nach Gebrauch keine Kleberückstände auf dem Schallkopf
- reinigen des Ultraschallkopfes nach Anwendung entfällt
- Ultraschallabdeckung aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei

Art.-Nr.:	Breite x Länge	VE*
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 Stk.
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 Stk.
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 Stk.
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 Stk.

* Einzel, steril verpackt



Alle **SonoGuard** Ultraschallabdeckungen enthalten zwei Gummiringe sowie zwei Klebestreifen. Chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln.

SonoGuard Ultraschallabdeckung

- sichert Sterilität bei ultraschallbegleiteten Eingriffen
- einfache Handhabung dank teleskopischer Faltung
- steriles Arbeiten ohne Artefakte
- aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei

Art.-Nr.:	Breite x Länge	VE*
US.10.140.025	14 x 25 cm	200 Stk.
US.10.140.040	14 x 40 cm	200 Stk.
US.10.140.080	14 x 80 cm	200 Stk.
US.10.140.120	14 x 120 cm	200 Stk.
US.10.140.160	14 x 160 cm	200 Stk.

* Einzel, steril verpackt




SonoGuard


Sterile Ultraschallabdeckungen

Anwendung der SonoGuard Ultraschallabdeckungen


SonoGuard Plus

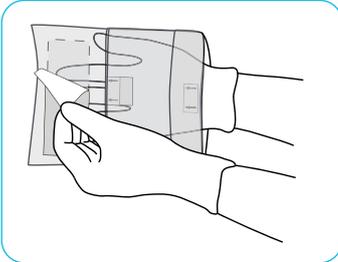


1. Schutzpapier abziehen

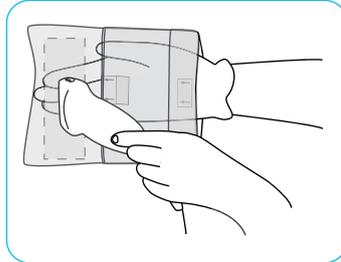

2. Ultraschallkopf positionieren

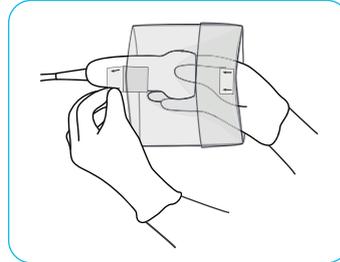

3. Abdeckung umstülpeln

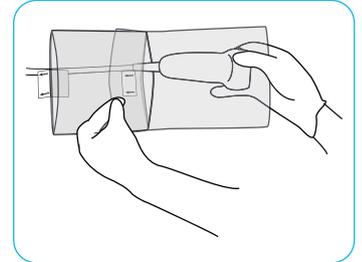


4. Abdeckung entfalten




5. Haftfolie andrücken


SonoGuard

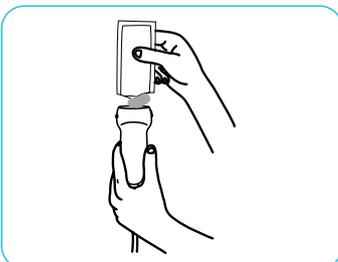


1. Gel auftragen

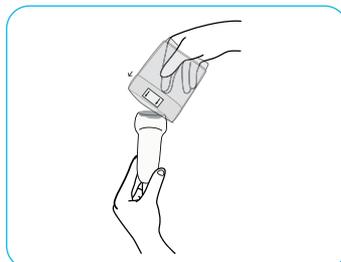

2. Abdeckung überstülpeln

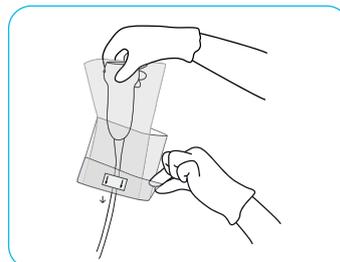

3. Abdeckung entfalten

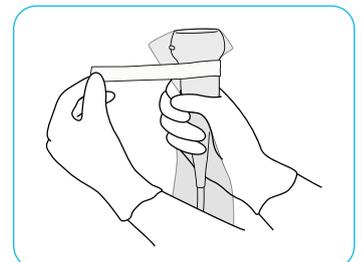

4. Abdeckung straffen

Ultraschallgel

Zubehör Geräteabdeckungen

- akustisch optimale Kopplungswerte
- neutral zu Haut und Schallkopf
- ohne zu verkleben
- hypoallergen
- wasserlöslich, geruchsneutral und farblos

Trasonic Gel

Steriles Ultraschallgel

Art.-Nr.:	Beschreibung	VE*
US.99.000.020	steriles Gel im Beutel, 20 ml	48 Stk.

* Einzeln steril verpackt

SonoGuard

Sterile Ultraschallabdeckungen

SonoGuard Plus Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- mit kohäsiver **ClearView**-Haftschalleitfläche
- steriles Ultraschall-Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln



Art.-Nr.:	Breite x Länge	VE*
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 Stk.
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 Stk.
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 Stk.
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 Stk.

* Einzel, steril verpackt

Inhalt

- 1 x **SonoGuard Plus** Ultraschallabdeckung
- 2 x Klebestreifen
- 2 x Gummiband
- 1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20ml

SonoGuard Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- steriles Ultraschall-Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln



Art.-Nr.:	Breite x Länge	VE*
US.10.140.025-G	14 x 25 cm	200 Stk.
US.10.140.040-G	14 x 40 cm	200 Stk.
US.10.140.080-G	14 x 80 cm	200 Stk.
US.10.140.120-G	14 x 120 cm	200 Stk.
US.10.140.160-G	14 x 160 cm	200 Stk.

* Einzel, steril verpackt

Inhalt

- 1 x **SonoGuard** Ultraschallabdeckung
- 2 x Klebestreifen
- 2 x Gummiband
- 1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20ml

OptiGuard QuickChange

Kamerabezüge zum schnellen Optikwechsel während des Eingriffs

OptiGuard QuickChange Pro & OptiGuard QuickChange Arthro

Weiterentwicklung der OptiGuard QuickChange Kamerabezüge

Die Vorteile auf einen Blick:


- uneingeschränkte Lichtdurchlässigkeit
- nur minimale optische Verzerrungen
- reduzierter Bildabstand zwischen Kamera und Endoskop
- erhöhte Koppelsteifigkeit zur Bildstabilisierung
- offener Einführkanal für das Okular
- redundante Anbindung des Endoskops

Jetzt auch mit inverser Teleskopfaltung


- 20% geringes Packvolumen
- Teleskopfaltung spart 40% Kunststoff im vgl. zu Balgfaltung im Ring
- einfache, sichere Handhabung anlog SonoGuard Plus Ultraschallabdeckungen

Anwendung der OptiGuard QuickChange Kamerabezüge


Balgfaltung im Ring

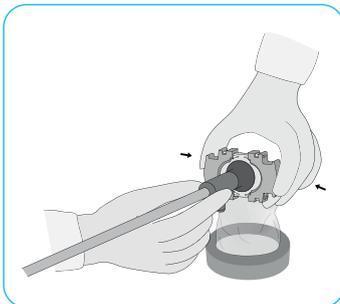


1. Endoskop anschließen

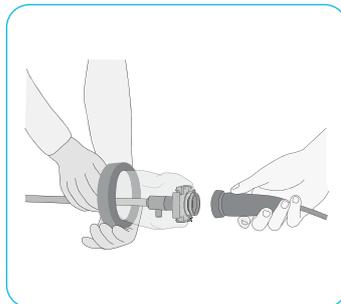

2. Kamera koppeln

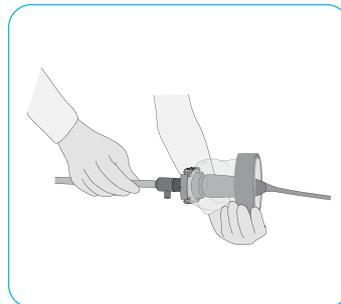


3. Kamerakopf abdecken

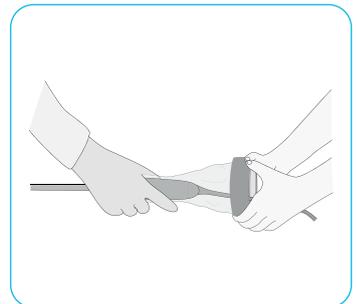


4. Folie entfalten


Inverse Teleskopfaltung

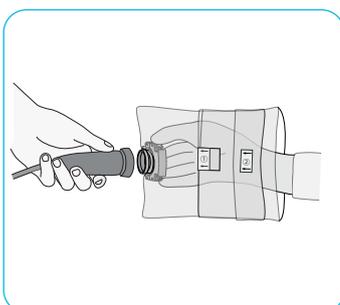


1. Kamera koppeln

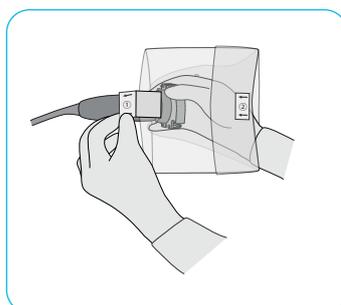

2. Folie überstülpen

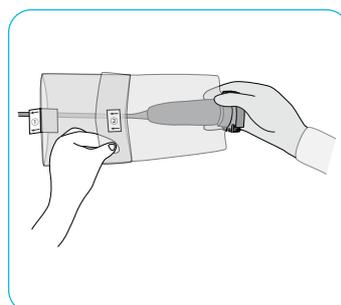

3. Folie entfalten

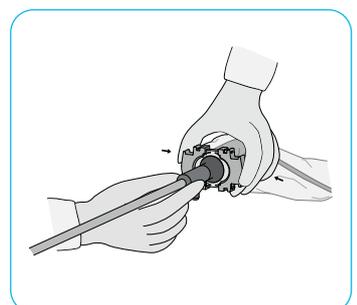

4. Endoskop koppeln

OptiGuard QuickChange

Kamerabezüge zum schnellen Optikwechsel während des Eingriffs

OptiGuard QuickChange Pro

Steriler Kamerabezug zum Optikwechsel mit hoher Bildstabilität, auch für hochauflösende Kameras geeignet

- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reißfest und antistatisch
- aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei



- ① = Doppelseitiger Schnappverschluss
② = Drainageöffnungen

Art.-Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE*
OG.40.140.250	Balgfaltung im Ring	14 x 250 cm	50 Stk.
OG.40.180.250	invers teleskopisch	18 x 250 cm	60 Stk.

* Einzel, steril verpackt

OptiGuard QuickChange Arthro

Wechsel des Endoskops mit wasserdichter Okularaufnahme. Optimiert für Eingriffe unter stetigem Spülen, wie in der Arthroskopie.

Ein Dichtungssystem zwischen dem Okular des angeschlossenen Endoskops und des Kopplers verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Sichtfeld der Kamera bei Einsatz unter stetigem Spülen.

Die wasserdichte Okularaufnahme der OptiGuard QuickChange Arthro spart kostbare Zeit, da der Eingriff nicht zum Reinigen und Entfernen von Flüssigkeit auf den Optiken unterbrochen werden muss.

- Kein Befeuchten der optischen Bauteile durch patentierte wasserdichte Okularaufnahme
- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reißfest und antistatisch
- aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei



- ① = Doppelseitiger Schnappverschluss
② = Drainageöffnungen
③ = Wasserdichte Okularaufnahme

Art.-Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE*
OG.41.140.250	Balgfaltung im Ring	14 x 250 cm	50 Stk.
OG.41.180.250	invers teleskopisch	18 x 250 cm	60 Stk.

* Einzel, steril verpackt

OptiGuard

Kamerabezüge

OptiGuard Access

Steriler Kamerabezug mit Kartoneinführhilfe


- mit Kartoneinführhilfe
- teleskopisch gefaltet
- Abreißöffnung zum Anschluss der Optik
- reißfest und antistatisch
- aus LDPE-Folie, Latex- und phthalatfrei




Art.-Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.10.130.250	teleskopisch mit Kartoneinführhilfe	13 x 250 cm	200 Stk.

* Einzel, steril verpackt


Anwendung der OptiGuard Access

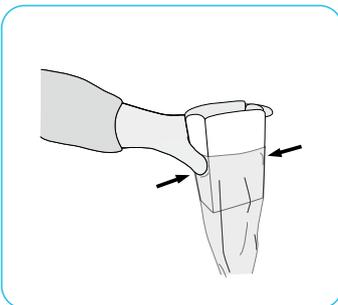


1. Kartoneinführhilfe öffnen

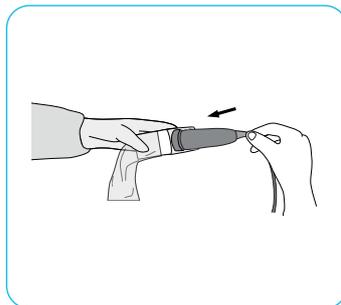


2. Kamera einführen

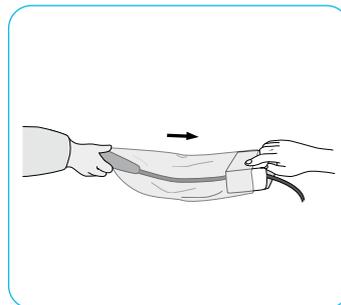


3. Abdeckung entfalten

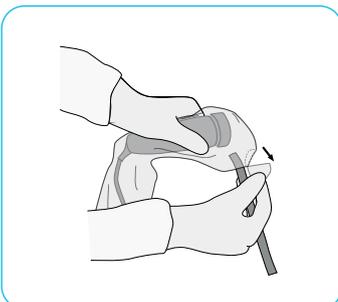

4. Spitze abreißen

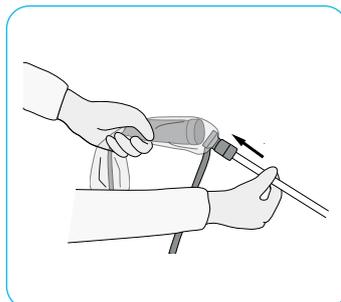

5. Endoskop einführen & koppeln

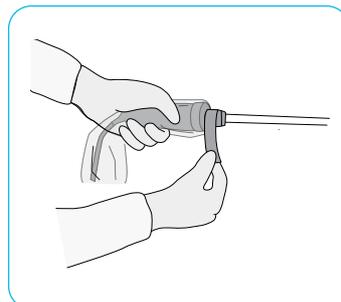

6. Abdeckung versiegeln & koppeln

Bestellinformationen

Ultraschallabdeckung mit ClearView-Haftschalleitfläche

SonoGuard Plus

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 Stk.
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 Stk.
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 Stk.
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 Stk.

SonoGuard Plus Set

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 Stk.
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 Stk.
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 Stk.
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 Stk.

Ultraschallabdeckung für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

SonoGuard

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.10.140.025	14 x 25 cm	200 Stk.
US.10.140.040	14 x 40 cm	200 Stk.
US.10.140.080	14 x 80 cm	200 Stk.
US.10.140.120	14 x 120 cm	200 Stk.
US.10.140.160	14 x 160 cm	200 Stk.

SonoGuard Set

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.10.140.025-G	14 x 25 cm	200 Stk.
US.10.140.040-G	14 x 40 cm	200 Stk.
US.10.140.080-G	14 x 80 cm	200 Stk.
US.10.140.120-G	14 x 120 cm	200 Stk.
US.10.140.160-G	14 x 160 cm	200 Stk.

Steriles Ultraschallgel

Trasonic Gel

Art.-Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.000.020	im Beutel, 20 ml	48 Stk.

Kamerabezug zum Optikwechsel

OptiGuard QuickChange^{Pro} mit Balgfaltung im Ring

Bestellcode	Breite x Länge	VE
OG.40.140.250	14 x 250 cm	50 Stk.

OptiGuard QuickChange^{Pro} invers teleskopisch

Bestellcode	Breite x Länge	VE
OG.40.180.250	18 x 250 cm	60 Stk.

Kamerabezug mit Koppler zum Optikwechsel und wasserdichter Okularaufnahme

OptiGuard QuickChange^{Arthro} Balgfaltung im Ring

Bestellcode	Breite x Länge	VE
OG.41.140.250	14 x 250 cm	50 Stk.

OptiGuard QuickChange^{Arthro} invers teleskopisch

Bestellcode	Breite x Länge	VE
OG.41.180.250	18 x 250 cm	60 Stk.

Kamerabezug mit Kartoneinführhilfe

OptiGuard Access teleskopisch gefaltet

Bestellcode	Breite x Länge	VE
OG.10.130.250	13 x 250 cm	200 Stk.



Gern helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Tel.: +49 40 3690 1690
E-Mail: info@promecon-medical.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:

www.promecon-medical.com

Oder abonnieren Sie unseren Newsletter. Unser Newsletter bietet Ihnen regelmäßig wertvolle Informationen und Praxistipps rund um unsere Geräteabdeckungen.

[Newsletter abonnieren](#)

Unsere Medizinprodukte sind mit großer Sorgfalt und nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen hergestellt. Promecon setzt sich dafür ein, dass solche Medizinprodukte den Ärztinnen und Ärzten in der medizinischen Therapie zur Verfügung stehen und die Patienten davon profitieren.

Advancing Health

Promecon ist Medizinproduktehersteller mit zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem (ISO 13485:2016).

Dieser Katalog dient ausschließlich zur Information über unsere Produkte. Irrtum vorbehalten. Katalognr.: PMC220321



PROMECON

PROMECON GmbH | Kreuzlerstraße 10 | 20095 Hamburg
Tel.: +49 40 3690 1690 | Fax: +49 40 3690 1699
info@promecon-medical.de | www.promecon-medical.com